
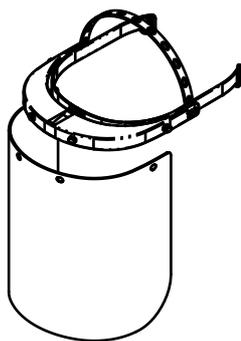


# NT\_MASK\_PROMOLD


## Cada paquete incluye

	Unidades	Denominación
A	1 ud	Soporte máscara articulado (3p)
B	1 ud	Lámina transparente PETG
C	1 ud	Banda de goma elástica
D	1 ud	Chapa ajuste goma

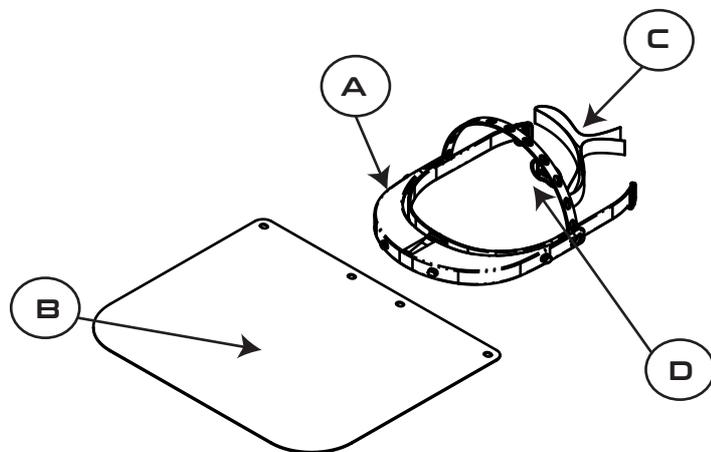


## Paso 2

Colocamos la banda elástica de fijación ayudándonos por la chapa de ajuste como se describe en la imagen adjunta.

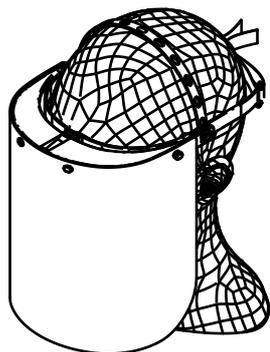

## Paso 1

Retiramos el protector plástico de ambas caras de la pantalla y la colocamos haciendo una ligera presión sobre los enganches.

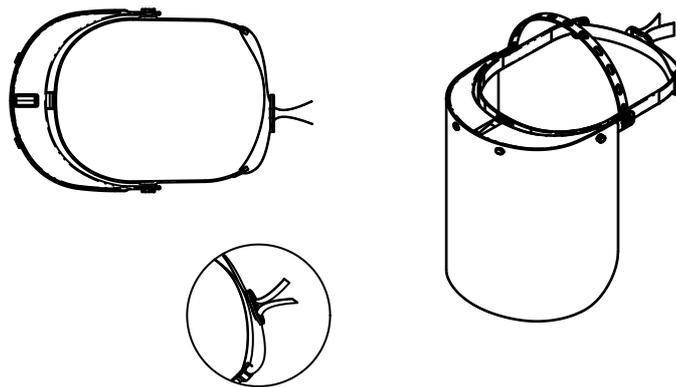

## Paso 3

Utilizaremos la pantalla tal como se muestra en la imagen adjunta. La cinta elástica de fijación y la tira superior nos ayudará a ajustar la pantalla a nuestra medida.